

**MEDISEPT**

Prawdziwa dezynfekcja

# PLAN HIGIENY

dla gabinetów kosmetycznych

PRZEZNACZENIE	ZASTOSOWANIE	PRODUKT	DOZOWANIE	KIEDY?	KTO?
 powierzchnie	Dezynfekcja małych, trudnodostępnych powierzchni (kozetki, blaty, stoły, fotele, klamki itp.)	Velox® Top AF Velox® Spray Velox® Medi Wipes Velox® Wipes Medisept Chusteczki do dezynfekcji rąk i powierzchni	Spryskać i odczekać 30 sek.	Codziennie, w razie potrzeby	
	Mycie i dezynfekcja delikatnych powierzchni (głowice, lampy itp.)	Velox® Foam Extra Velox® Wipes NA	Spryskać/przetrzeć chusteczką i odczekać 1 min.	Dezynfekcja po każdym kliencie	
	Mycie i dezynfekcja dużych powierzchni	Quatroles® Extra Quatroles® Forte	0,5% w 15 min. (5 ml na 995 ml wody)	Codziennie, w razie potrzeby	
	Dezynfekcja wanny z hydromasażem	Quatroles® Unit NF	1% w 15 min. (10 ml na 990 ml wody) Przepłukać wodą	Dezynfekcja po każdym kliencie	
 narzędzia kosmetyczne	Dezynfekcja narzędzi kosmetycznych	Alodes N	Zanurzyć w gotowym do użycia preparacie na 15 min.	Dezynfekcja po każdym kliencie	
	Dezynfekcja przyrządów kosmetycznych	Velox® Top AF Velox® Spray	Spryskać i odczekać 30 sek.	Bezpośrednio po użyciu	
	Dezynfekcja narzędzi kosmetycznych	Viruton® Extra  Viruton® Forte	0,5% w 30 min (5 ml na 995 ml wody)  0,5% w 30 min. (10 ml na 990 ml wody)	Dezynfekcja po każdym kliencie	
 ręce	Odkażenie rąk	Velodes® Soft Velodes® Gel Medisept Chusteczki do dezynfekcji rąk i powierzchni	Higieniczna dezynfekcja w 30 sek. (2 x 3 ml płynu)	Przed każdym zabiegiem i po jego zakończeniu	
	Mycie rąk	Velodes® Scrub Velodes® Soap	Nanieść na wilgotne dłonie do czasu powstania delikatnej piany, spłukać wodą	W razie potrzeby	
	Pielęgnacja rąk	Velodes® Cream Velodes® Cream Aloe Vera	Delikatnie wmasować w skórę dłoni i paznokcie	Po każdym myciu rąk lub w razie potrzeby	

Uwaga! Wszystkie przedmioty jednorazowe i odpady zbierać natychmiast po użyciu do oznakowanych pojemników przeznaczonych do tego celu, następnie postępować zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych.