



MEDISEPT



## MEDISEPT Chusteczki do dezynfekcji rąk i powierzchni

**Wysokiej jakości, alkoholowe chusteczki przeznaczone do dezynfekcji zarówno rąk, jak i wszelkich małych powierzchni odpornych na działanie alkoholu**

Wydajne chusteczki do rąk i powierzchni o działaniu bakteriobójczym, drożdżakobójczym, bójczym wobec prątków gruźlicy i ograniczonym wirusobójczym (działają m in. na wirusa opryszczki, wirusa HIV, wirusa żółtaczkę typu B i C i wirusa Rota).

### Cechy produktu:

- Przebadane zgodnie z nowymi normami dla środków dezynfekcyjnych.
- Dezynfekcja higieniczna w 30 sek. (płyn nasączający przebadany zgodnie z normą EN 1500).
- Wysokiej jakości chusteczka o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>.
- Wydajność jednej chusteczki wynosi 0,5 m przy podwójnym przetarciu\*.
- Chusteczki włókninowe 19 x 15 cm.
- Rejestracja: wyrób medyczny i produkt biobójczy.

\* Test wykonano w oparciu o metodykę normy EN 16615 dla testu czteropolowego, na porowatej powierzchni, w temp. 24°C

### Korzyści dla użytkownika:

- Zalecane do rąk i małych powierzchni w obszarze medycznym i miejscach publicznych.
- Wygodne w użyciu.
- Delikatny świeży zapach.
- Zawierają glicerynę - substancję nawilżającą.
- Okienko zamykające wykonane z twardego tworzywa gwarantuje stałą wilgotność chusteczek po otwarciu.



Działa  
w 30 sek.  
na TBC, Rota



Opakowanie  
50 szt.



Dezynfekuje  
i chroni  
dłonie



Dezynfekuje  
powierzchnie



Zapach  
Cashmere

**TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE  
Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ**

# MEDISEPT Chusteczki do dezynfekcji rąk i powierzchni

## Zastosowanie:

MEDISEPT Chusteczki do dezynfekcji rąk i powierzchni przeznaczone do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni medycznych, sprzętu medycznego, foteli zabiegowych, łóżek, aparatury medycznej i operacyjnej oraz innych trudno dostępnych powierzchni. Zalecane również do dezynfekcji protez i wycisków silikonowych - jako wyrób medyczny.

MEDISEPT Chusteczki do dezynfekcji rąk i powierzchni na bazie alkoholu przeznaczone są do higienicznej dezynfekcji rąk oraz dezynfekcji wszelkich małych powierzchni w obszarze medycznym odpornych na działanie alkoholu. Zalecane są do takich powierzchni jak blaty, klamki, uchwyty, powierzchnie siedzisk i akcesoria wykonane z tworzyw sztucznych, stali szlachetnej, porcelany, tworzywa ABS - jako produkt biobójczy.

Nie zawierają aldehydu i fenolu dzięki czemu nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Do użytku powszechnego.

SPEKTRUM	NORMY WG EN 14885	CZAS
Bakterie	EN 13727	30 sek.* , 60 sek.
	EN 16615	30 sek.
Grzyby ( <i>C. albicans</i> )	EN 1275	30 sek.*
	EN 16615	30 sek.
	EN 13624	30 sek.*
Prątki grzyźlicy ( <i>M. terrae</i> )	EN 14348	30 sek.*
Wirusy osłonkowe	EN 14476	30 sek.*
Wirus BVDV	EN 14476	30 sek.*
Wirus Rota	EN 14476	45 sek.*
Higieniczna dezynfekcja rąk**	EN 1500	2 x 1,5 ml w czasie 2 x 15 sek.
Chirurgiczna dezynfekcja rąk	EN 12791	2 x 1,5 ml w czasie 90 sek. + przedłużone działanie do 3 godz.

\*warunki czyste

\*\*badanie wykonane na płynie nasączającym  
1 chusteczka zawiera ok. 3,56 ml płynu dezynfekującego

## Sposób użycia:

Chusteczkę wyjąć z opakowania i przetrzeć nią ręce lub powierzchnię. Dokładnie zamknąć opakowanie. Po otwarciu opakowanie zużyć w ciągu 21 dni. Nie używać jeśli chusteczka jest sucha.

## Skład: 50 sztuk zawiera:

178 g roztworu nasączającego

## Skład: substancja czynna w 100 g roztworu:

60 g Propan-2-ol, 0,5 g kwas d-glukonowy, związek z N,N''-bis(4-chlorofenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13 tetraazatetradekanodiamidyną (2:1)

## Opakowanie handlowe:

50 szt. chusteczek w opakowaniu typu flow pack z samoprzylepnym okienkiem



## Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 6678/16

Wyrób medyczny klasy II a w rozumieniu Ustawy o Wyrobach Medycznych.  
Przeznaczony do dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk.



Karta charakterystyki dostępna na stronie [www.medisept.pl](http://www.medisept.pl)



Wytwórca:  
**MEDISEPT Sp. z o.o.**  
ul. Ludwika Spiessa 4  
20-270 Lublin

telefon: + 48 81 535 22 22  
[info@medisept.pl](mailto:info@medisept.pl)  
[www.medisept.pl](http://www.medisept.pl)

Data opracowania: 02.2024 rev.2