



MEDISEPT



# Velox<sup>®</sup> Oxy ETA

## Płyn do dezynfekcji i mycia małych powierzchni

Velox<sup>®</sup> Oxy ETA rekomendowany jest do dezynfekcji małych powierzchni w obszarze medycznym, jak i pozamedycznym. Nadaje się do dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnego sprzętu medycznego jak np. fotele zabiegowe, aparatura medyczna, sprzęt rehabilitacyjny a także końcówek stomatologicznych, unitów, lamp zabiegowych, tyłek protetycznych, protez i wycisków. Velox Oxy ETA rekomendowany jest do codziennej dezynfekcji powierzchni i sprzętów w obszarze podwyższonego ryzyka zakażenia *Clostridioides difficile*. Redukcja ryzyka zakażenia w sytuacjach konieczności wysokiego reżimu sanitarnego.

### Cechy produktu:

- Szerokie działanie sporobójcze w czasie 15 min (*C.difficile*, *B.subtilis*).
- Pełne działanie grzybobójcze w czasie 30 sek. (*A. brasiliensis*, *C. albicans*).
- Działa w 30 sek. na wirusy osłonkowe (m.in. Vaccina, HIV, HBV, HCV) i w 15 sek. na wirusy nieosłonkowe (Noro).
- Rejestracja: wyrób medyczny i produkt biobójczy.

### Korzyści dla użytkownika:

- Skuteczność bójcza potwierdzona badaniami wg najnowszych norm.
- Redukcja ryzyka zakażenia w sytuacjach konieczności wysokiego reżimu sanitarnego.
- Szybki efekt czystej i zdezynfekowanej powierzchni bez smug i zacieków.
- Nie zawiera aldehydów i fenoli, nie powoduje niszczenia powierzchni.
- Możliwość zastosowania do wielu powierzchni w obszarze medycznym oraz pozamedycznym.
- Kompatybilny do nasączania ściereczkami MEDISEPT Dry Wipes.



Spray



Działa na  
Polio, Adeno,  
Noro, Spory



Powierzchnie  
medyczne  
i pozamedyczne



Narzędzia  
fryzjerskie  
i kosmetyczne

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE  
Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ

## Zastosowanie:

Velox® Oxy ETA rekomendowany jest do dezynfekcji małych powierzchni w obszarze medycznym, jak i pozamedycznym. Nadaje się do dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnego sprzętu medycznego jak np. fotele zabiegowe, aparatura medyczna, sprzęt rehabilitacyjny - jako wyrób medyczny.

Płyn do dezynfekcji małych powierzchni w obszarze medycznym, domach opieki, sanatoriach, salonach fitness i SPA, salonach fryzjerskich, kosmetycznych, gabinetach masażu, przedszkolach, szkołach oraz do dezynfekcji powierzchni niemających kontaktu z żywnością. Nadaje się do dezynfekcji powierzchni takich jak blaty, stoły, klamki, uchwyty oraz do sprzętu i akcesoriów fryzjerskich i kosmetycznych – jako produkt biobójczy.

Produkt posiada działanie sporobójcze, bakteriobójcze, drożdżakobójcze i wirusobójcze oraz bójcze wobec wirusów osłonkowych. Do użytku profesjonalnego.

SPEKTRUM	NORMY WG EN 14885	OBCIĄŻENIE ORGANICZNE WYSOKIE
Bakterie	EN 13727	15 sek.
	EN 16615	30 sek.
	EN 13697	60 sek.*
Grzyby ( <i>C.albicans</i> )	EN 13624	15 sek.
	EN 16615	30 sek.
	EN 13697	60 sek.
Grzyby ( <i>A.brasiliensis</i> )	EN 13624	30 sek.
	EN 16615	30 sek.
	EN 13697	60 sek.
Prątki ( <i>M.terrae</i> , <i>M.avium</i> )	EN 14348	3 min
Wirusy osłonkowe	EN 14476	30 sek.
Wirusy Noro	EN 14476	15 sek.
Wirus Adeno	EN 14476	30 sek.
Wirus Polio	EN 14476	15 sek.
Spory ( <i>B.subtilis</i> )	EN 13704	10 min
Spory ( <i>Cl.difficile</i> R027)	EN 17126	15 min*, 30 min.

\*warunki czyste

## Sposób użycia:

Spryskać preparatem powierzchnię z odległości 20-30 cm dbając o całkowite jej pokrycie. Nadmiar preparatu zdjąć używając np. ręcznika jednorazowego. Powierzchnia nie wymaga spłukania wodą. W celu dezynfekcji szczególnie delikatnych powierzchni (np. skóry naturalnej) zalecany jest test w niewidocznym miejscu. Velox® Oxy ETA może być stosowany do dezynfekcji powierzchni odpornych na działanie alkoholu. Wyrób przeznaczony do zastosowania przez profesjonalnego użytkownika. Nie łączyć z innymi środkami czyszczącymi lub dezynfekującymi. Przed użyciem przeczytać ulotkę informacyjną.

## Skład: substancja czynna w 100 g preparatu:

72,8 g etanol,

7,2 g propan-2-ol,

3 g nadtlenu wodoru.

## Opakowanie handlowe:

butelka 1 l ze spryskiwaczem



Wyrób medyczny klasy II a w rozumieniu Ustawy o Wyrobach Medycznych. Przeznaczony do dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych.

Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 9820/24

Karta charakterystyki dostępna na stronie [www.medisept.pl](http://www.medisept.pl)

